

# Manual de Funcionamiento Rápido Luna GII

## 1. Funciones de los Botones



Botón Mute: Presionelo para silenciar las alarmas




Perilla: Inicie el tratamiento y ajuste la configuración del dispositivo



Botón Rampa: Presionelo para activar la función Rampa

## 2. Puesta en marcha del Dispositivo

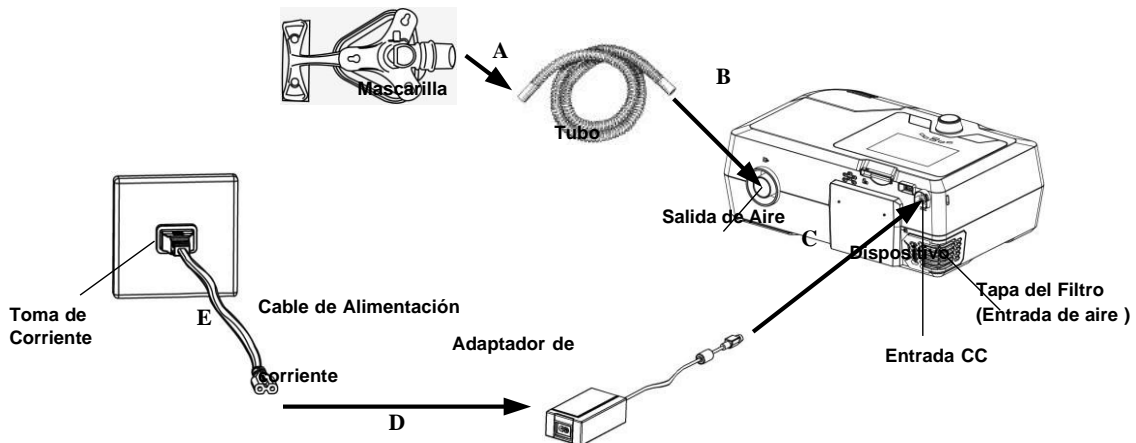

Conecte un extremo del tubo a la mascarilla ensamblada.


- A. Conecte el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, como muestra la imagen más arriba.
- B. Conecte el adaptador de corriente a la entrada CC del dispositivo.
- C. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
- D. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

## 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Después de conectar el dispositivo a la corriente, su pantalla muestra la Interfaz Principal que puede verse en la siguiente imagen.




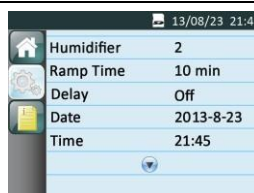


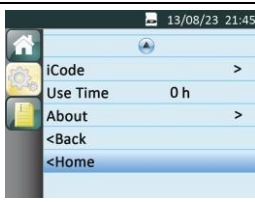


B. Desde la Interfaz Principal presione y mantenga pulsado el **Botón Rampa** durante tres segundos. La pantalla muestra la Interfaz de Configuración Inicial, como muestra la imagen abajo.

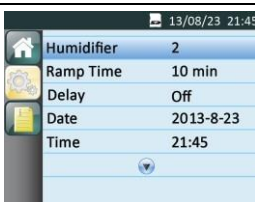

C. Pulse la **Perilla** para acceder a la Interfaz de Configuración, como muestra la siguiente imagen.

## Manual de Funcionamiento Rápido Luna GII V1.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>D. Pulse y gire la <b>Perilla</b>  para seleccionar una opción.</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>E. Pulse la <b>Perilla</b>  para confirmar y fijar su opción.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>F. El cursor se desplaza entre las opciones según va girando la <b>Perilla</b> . Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor se encuentra en la opción <b>Inicio</b>, como muestra la siguiente imagen, pulse la Perilla para salir a la Interfaz de Configuración.</p> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

#### 4. Iniciar Tratamiento

Una vez que termine de ajustar la configuración del dispositivo y regrese a la Interfaz Principal, pulse la **Perilla** para iniciar el tratamiento.